

clinell®



Complete with two disinfectant wipes:
and disposal of blood & body fluid spills.
generating wipe for the safe disinfection
super-absorbent peracetic acid

PATENTED
FORMULA

SPILL WIPES

Mimořádně savé utěrky, které in situ generují kyselinu peroctovou a peroxid vodíku. Bezpečně tak dezinfikují a odstraňují skvrny od krve a dalších tělesných tekutin.

UTĚRKY

KLINICKÉ VÝHODY

- **Jednoduché, rychlé a vysoce účinné.**
Nahrazují tradiční úklidové pomůcky na bázi chloru, jejichž používání je časově náročné a nebezpečné.
- **Prokázaná schopnost ničit všechny známé druhy mikroorganismů vázané na skvrny od krve, moči a fekálií.**
- **Patentovaná technologie.**
Mimořádně stabilní chemické složení bez jakýchkoli toxických výparů umožňuje používat utěrky v blízkosti pacientů.
- **Založené na technologii světově uznávaných dezinfekčních utěrek.**
Podobně jako u utěrek Clinell Sporicidal generuje mimořádně savá vrstva kyseliny peroctovou a peroxid vodíku.
- **Jednoduchá a bezpečná likvidace použitých utěrek.**
Obal utěrek Clinell Spill wipes je navržen tak, aby do sáčku bylo možné zpět vložit nejen použité utěrky, ale i ochranné pomůcky uživatele a umístit vše do příslušného kontejneru pro odpad.
- **Zvyšují úroveň plnění hygienických předpisů** díky snadnému použití.



OBSAH:
MIMOŘÁDNĚ SAVÁ UTĚRKA GENERUJÍCÍ KYSELINU PEROCTOVOU A PEROXID VODÍKU (1 KS). VELKÉ ZVLHČENÉ DEZINFEKČNÍ UTĚRKY (2 KS). VŠE V PRAKTICKÉM OPAKOVANĚ UZAVÍRATELNÉM BALENÍ USNADŇUJÍCÍM LIKVIDACI ODPADU.

DBEJTE NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA ŠTÍTKU A INFORMACE O PRODUKTU.

Tradiční postup v případě potřísnění krví vyžaduje, aby bezpečnému odstranění skvrny předcházela její dekontaminace chlorovými přípravky. To představuje zdlouhavý proces: aplikovat separační prostředek po obvodu skvrny, nanést na skvrnu granule chlórového biocidu a nechat je několik minut neutralizovat krevní patogeny. Poté je nutno lopatkou odstranit pevný materiál, zlikvidovat jej v pytli na nebezpečný biologický odpad a setřít potřísněné místo dalšími savými utěrkami. Během tohoto postupu, který zabere přibližně 10 minut, je pracovník vystaven zdraví nebezpečným chemikáliím a toxickým výparům. Právě to bývá v praxi příčinou toho, že úroveň plnění hygienických předpisů při práci s běžnými chlorovými prostředky není vždy dostatečná. Při použití utěrek Clinell Spill wipes je celý proces nakládání se skvrnami od krve a dalších tělesných tekutin výrazně snazší a bezpečnější. Lze tak předpokládat vyšší míru dodržování hygienických předpisů ze strany zdravotnického personálu.

ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY

Vysoce účinný oxidant ničí veškeré mikroorganismy včetně neobalených virů a bakteriálních endospor. Splňuje normy ČSN EN1275, ČSN EN1276, ČSN EN13704, ČSN EN14348, ČSN EN14476, ČSN EN14561, ČSN EN14562 a ČSN EN14563.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Navlékněte si odpovídající osobní ochranné pomůcky.
2. Otevřete balení.
3. Vytáhněte utěrku.
4. Strana A je aktivní a je určena k aplikaci na skvrnu.
5. Přiložte aktivní stranu (A) na skvrnu. Nechte ji absorbovat po dobu 30 sekund.
6. Pítkněte tlakem na stranu s folií (B) a stírejte, dokud není skvrna zcela absorbována.
7. Použitou utěrku vložte zpět do obalu.
8. Ze sáčku vyjměte dezinfekční utěrku.
9. Esovitým pohybem od čisté plochy ke znečištěné setřete potřísněné místo.
10. Použitá utěrka a prázdný sáček vložte zpět do obalu.
11. Opakujte případně kroky 8-10 s druhou utěrkou a obal znovu uzavřete.
12. Použijte příslušný kontejner pro odpad.

POPIS VÝROBKU	OBSAH	VELIKOST	KÓD
Utěrky Clinell Spill Wipes	Jedno balení	400 x 400 mm	CSW1

Distribuce v ČR:

Medivet international, s.r.o. Konojedská 19, Praha 10

Tel. +420 274 822 158 | e-mail: medivet_odbyt@volny.cz | www.medivet-international.eu