

MEDICAL WIPES LINE

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.




D-wipes Q 700
náhradní náplň



D-wipes Q 700



D-wipes Q 160

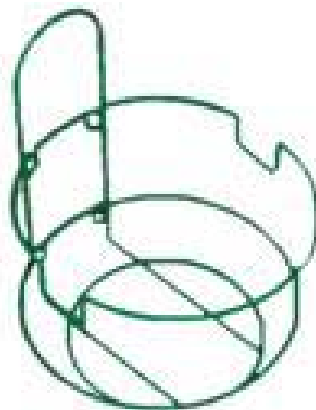

Závěsný drátěný košíček
pro D-wipes Q 700

D-WIPES Q

alkoholové dezinfekční ubrousky s příměsí
chlorhexidinu a peroxidu vodíku

Zvlhčené dezinfekční ubrousky z netkané textilie D-wipes Q jsou umístěny v dózách se speciálním uzávěrem, který zamezuje vysychání. Dóza pro D-wipes Q 700 má tvar kbelíku se speciálním víčkem a je do ní dodávána také náhradní náplň v PP/PE sáčku. Dóza pro D-wipes Q 160 má tvar válce se speciálním víčkem a náhradní náplň k ní dodávána není. Výroba tohoto typu dózy je levná, náhradní náplň by nepřinesla spotřebiteli žádaný ekonomický efekt a navíc manipulace s takto malou náhradní náplní je nežádoucí - alkoholy rychle vysychají a výměnu náplně by bylo nutné zvládnout velmi rychle. Uvnitř obou dóz je vždy umístěna role zvlhčené netkané textilie s perforací, která umožňuje při průchodu vytahovací štěrbinou ubrousky jednotlivě odtrhávat. Dezinfekční roztok je silně alkoholický, ubrousky jsou určeny pro rychlou dezinfekci malých ploch, zdravotnických prostředků i rukou. Výrobek je registrován jako biocidní přípravek, typ 2 - pro profesionální použití, reg. č. MZDR 45855/2012 SOZ. Použití ubrousků je jednoduché – předmět nebo plochu důkladně otřít a nechat zaschnout. Pro větší plochy a lepší účinek použijte vždy více utěrek, případně otěr opakujte. Pro baktericidní a virucidní účinek na ruce použijte buď 2 ubrousky D-wipes Q 160 nebo 1 ubrousek D-wipes Q 700. Žádné alkoholové ubrousky nejsou vhodné na otírání plexiskla, kůže a koženky, protože způsobují vysychání a při dlouhodobém používání tak mohou v těchto materiálech vznikat povrchové praskliny. Toto se týká i výrobků D-wipes Q (v sortimentu Medivet international najdete řadu bezalkoholových dezinfekčních ubrousků vhodných právě na tyto povrchy).

Účinné látky v g na 100 g roztoku:

Alkoholy >70,0, chlorhexidin < 1,0, peroxid vodíku < 1,0, voda < 28,0.

Balení D-Wipes Q 700 obsahuje 700 trhacích ubrousků o rozměru 200 x 200 mm, čistá váha dezinfekčního roztoku 2378 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 4,4 g, z toho připadá 3,4 g na dezinfekční roztok a 1 g na netkanou textilií.

Balení D-Wipes Q 160 obsahuje 160 trhacích ubrousků o rozměru 180 x 135 mm, čistá váha dezinfekčního roztoku 334 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 2,6 g, z toho připadá 2,1 g na dezinfekční roztok a 0,5 g na netkanou textilií.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, mykobaktericidní (tuberkulocidní), fungicidní, virucidní. Kontaktní čas se liší podle jednotlivých druhů mikroorganismů a odpovídá těmto normám:

Baktericidní - ČSN EN 13727, Mykobaktericidní - ČSN EN 14348, Fungicidní - ČSN EN 13624, Virucidní - ČSN EN 14476.

Bezpečnostní informace a opatření:

Klasifikace impregnačního roztoku:

F - Vysoce hořlavý

Xi - Dráždivý

R36 Dráždí oči.

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Podle zákona 350/2011 Sb. a směrnic Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES v posledním platném znění není přípravek klasifikován jako nebezpečná směs a nepodléhá povinnému značení.

Vedlejší účinky:

Při dlouhodobém používání výrobek způsobuje vysušování otíraných materiálů i lidské pokožky.

První pomoc:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte pitnou vodou, při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce: Oradata, s.r.o., Konojedská 19, Praha 10

Distribuce: Medivet international, s.r.o., Konojedská 19, Praha 10

