

Produktový list č.: **EAF1110, 1120, 1130**

## Sani-Cloth AF

### bezalkoholové dezinfekční utěrky



Zvlhčené utěrky Sani-Cloth AF obsahují účinné látky na bázi kvarterních amonů a jsou primárně určeny k čištění a dezinfekci malých ploch, předmětů, přístrojů a vybavení ve zdravotnictví. Najdou však široké použití také na mnoha jiných pracovištích. Kromě účinných biocidních látek obsahují také povrchová činidla, která dobře odstraňují nečistoty. Při dezinfekci malých předmětů a ploch jsou rychlé, spolehlivé a vždy připravené k okamžitému použití. Nepoškožují citlivé materiály jako např. kůže, koženka, plexisklo aj. Účinné látky neobsahují alkohol, PHMB ani žádné jiné látky podezřelé z karcinogenních účinků. Údaje o účinnosti jsou uvedeny na 2. straně tohoto listu. Zvlhčovací roztok, kterým jsou utěrky napuštěny, je slabě zásaditý. Ke kbelíku lze použít drátěný držák k upevnění na stěnu, kat. kód UC-477, který dodáváme k obdobnému výrobku jiného výrobce.

**Klasifikace výrobku:** Zdravotnický prostředek třídy IIa

**Účinné látky:** Kvarterní amonné soli

**Odkaz na web:** [WEB](#)

**Odkaz pro bezpečnostní list:** [BL](#)

**Odkaz pro notifikaci ZP:** [SUKL](#)

#### Technické obchodní a logistické údaje

Výrobek	Kat. kód	Rozměry utěrek (mm)	Typ netkané textilie	Obsh kartonu (ks)	Váha kartonu (kg)	Rozměry kartonu (cm)	EAN kód výrobku	EAN kód kartonu
<b>Kbelík 225 ks</b>	EAF1110	270 x 267	Polypropylen, 25 g/m <sup>2</sup>	1	1,65	23 x 23 x 20 v.	5 056012 300626	***
<b>Dóza 200 ks</b>	EAF1120	200 x 200	Polypropylen, 18 g/m <sup>2</sup>	6	***	***	***	***
<b>Flow pack 200 ks</b>	EAF1130	267 x 210	Polypropylen, 34 g/m <sup>2</sup>	6	8,40	25 x 47 x 21 v.	5 056012 301081	5 056012 301098

**Pozn.:** Kbelík 225 ks je dodáván bez kartonu, údaje o velikosti kartonu uvedené v tabulce jsou hypotetické, váha je uvedena za 1 kbelík s ubrousky. Výrobek Dóza 200 aktuálně nedodáváme.

**Výrobce:** Professional Disposables International, Ltd., Corby, Velká Británie

## Údaje o provedených testech účinnosti dezinfekčních utěrek Sani-Cloth AF

	Norma	Mikroorganismus	Kontaktní čas - podmínky	
			čisté	znečištěné
Bakterie	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec.	2 min.
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec.	2 min.
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec.	2 min.
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec.	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec.	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec.	
Kvasinky	EN 16615	Candida albicans	60 sec.	2 min.
	EN 13624	Candida albicans	30 sec.	
	EN 13624	Candida auris	30 sec.	
Obalené viry	EN 14476	Vaccinia Virus - zahr. všechny obalené viry - HIV, Hepatitis A,B,C, H1N1, H5N1	30 sec.	60 sec.
	EN 14476	Human Coronavirus ATCC VR-740	30 sec.	
Neobalené viry	EN 14476	Norovirus	30 sec.	60 sec.
Mykobakterie	EN 14348	Mycobacterium terrae	2 min.	

Pozn.

Utěrky jsou deklarovány jako „čistící a dezinfekční“, protože kromě účinných dezinfekčních látek obsahují také surfaktanty zajišťující dobrou schopnost odstraňovat z povrchu nečistoty nejrůznějšího druhu. Návod k použití je formulován tak, aby v případě aplikace na viditelně znečištěný povrch byly provedeny otěry dva. První otěr zajistí (je-li to potřeba) odstranění jakéhokoli znečištění a druhý otěr pak provede potřebnou dezinfekci.