

Prevantics® 2% Device Swab

zvlhčené dezinfekční ubrousky, zdravotnický prostředek tř. IIa.

CE
2797




Návod k použití:

(verze 2, 1.8.2023)

Výrobek je primárně určen k dekontaminaci a dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků - bezjehlových konektorů, rozbočovačů a spojovacích portů. Při použití dodržujte místní zásady zdravotní péče týkající se osobních ochranných prostředků, hygienu a pokyny pro likvidaci odpadu.




1
Roztrhněte sáček a vyjměte ubrousek.

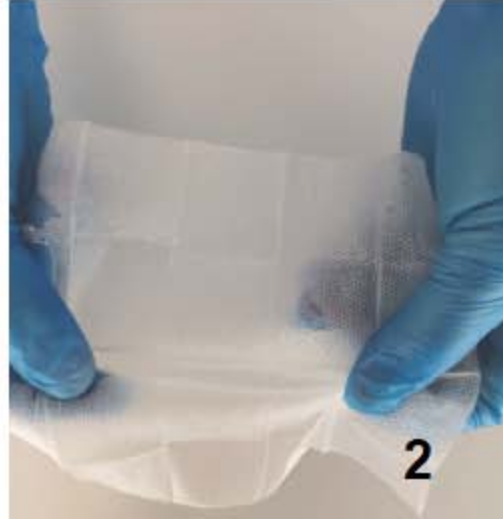

2
Ubrousek rozložte.



3
Otáčivými pohyby tam a zpět provádějte čištění minimálně 30 sekund.

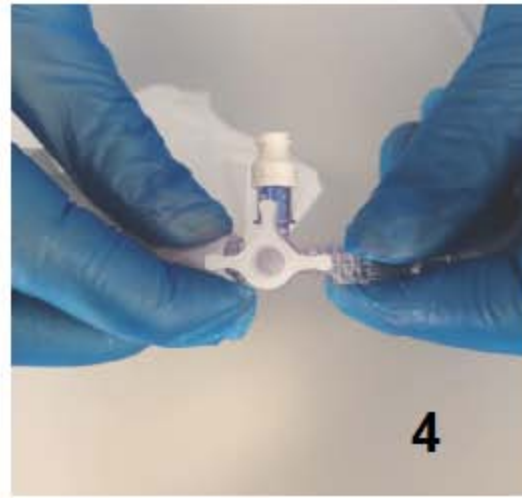

4
Ujistěte se, že je konektor zcela dezinfikován. Nechte místo bezjehlového vstupu volně vyschnout po dobu 30 sekund.

Výrobce:

Professional Disposables International Ltd (PDI), Pywell Road, Willowbrook Industrial Estate, Corby, NN17 5XJ, United Kingdom

Zplnomocněný zástupce:

Nex Medical Antiseptics Srl., Via Arluno 37/39, Casorezzo Milan, Italy

Dovozce:

Oradata, s.r.o., Konojedská 19, Praha 10, IČO 45787514
Tel. +420 274822158, obchod@oradata.cz

